

MANUEL D'UTILISATION

DUO PRO



CE
0197

ELECTROSTIMULATORS GLOBUS

produits par: SAVIA L.t.d. - 2nd Industrial District, Feng Huang Village (Shenzen) - Made in PRC - sales@tyece.com

Et importés et distribués par:: Domino s.r.l. - via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè -TV -ITALY - Tel. (+39) 0438.7933 - info@globuscorporation.com

L'appareil a été construit en conformité aux normes techniques en vigueur, et a été soumis à certification selon la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux. Pour maintenir le niveau maximum de sûreté l'utilisateur doit utiliser l'appareil dans le respect des prescriptions et des limites d'emploi du manuel d'utilisation. Le producteur décline toute responsabilité en cas d'utilisation difforme de ce qui est indiqué et prescrit dans ce manuel. Sans l'autorisation écrite par le producteur toute reproduction, même partielle sous toute forme ou à l'aide de moyens électroniques ou mécaniques des textes et des photos contenues dans ce manuel est interdite.

SOMMAIRE

-Contenu des programmes de DUO PRO	3
- Accessoires	4
- Précautions d'emploi	5
- Caractéristiques techniques de l'appareil palmaire	8
- Ecoulement des électrodes et des piles degli elettrodi e delle pile	
- Description de l'appareil palmaire	10
- Description du display palmaire	11
- Guide pour une simple utilisation du palmaire	11
- Première utilisation	
- Mettre en pause un programme	
- Fonctions automatiques	
- Eteignement automatique	
- Relèvement du contact électrique	
- Relèvement de batterie déchargée	
- Fonction de mémoire	
- Intensité de stimulation	
- Fonctions spéciales	
- Bloquage des touches	
- Positionnement des batteries	42
- Connexion des cables	42
- Application des électrodes	42
- Questions courantes	14
- Conditions de garantie	15
- Positionnement des électrodes	16

CONTENU DES PROGRAMMES DE DUO PRO

SPORT

- 1- Capillarisation:** 25 minutes. Améliorer la capacité à maintenir un effort musculaire intense de moyenne durée.
Intensité: Modérée (vibration musculaire bien visible)
- 2- Échauffement:** 10 minutes. Préparer le muscle à fournir un effort en commençant par un travail léger et contrôlé.
Intensité: Modérée (vibration musculaire)
- 3- Defatigant:** 20 minutes. Améliorer la récupération immédiatement après l'effort. Action relaxante.
Intensité: Modérée (vibration musculaire)
- 4- Force Maximale:** 20 minutes. Améliorer la capacité à produire une force maximale. Développer la masse musculaire
Intensité: Maximale supportée (contaction musculaire maximale sans douleur)
- 5- Force Résistance:** 25 minutes. Améliorer la capacité à maintenir un effort soutenu sur une moyenne durée.
Intensité: Moyenne à forte (contaction musculaire bien visible)
- 6-Force Explosive:** 20 minutes. Améliorer la capacité à développer une force maximale de manière instantanée. Trasformer la force pure en force explosive.
Intensité: Maximale supportée (contaction musculaire maximale sans douleur)
- 7- Reactivité:** 15 minutes. Améliorer la capacité à réaliser des contractions musculaires maximales, très brèves à grande vitesse d'exécution.
Intensité: Maximale supportée (contaction musculaire maximale sans douleur)

FITNESS

- 8- Drainage Bras:** 30 minutes. Effectuer un massage.
Intensité: Modérée (vibration musculaire)
- 9- Drainage Jambes:** 25 minutes. Effectuer un massage profond.
Intensité: Modérée (vibration musculaire)
- 10- Drainage Fesses:** 25 minutes. Effectuer un massage.
Intensité: Modérée (vibration musculaire)
- 11- Dreainage Ventre:** 25 minutes. Effectuer un massage.
Intensité: Modérée (vibration musculaire)
- 12- Drainage Hanches:** 25 minutes. Effectuer un massage.
Intensité: Modérée (vibration musculaire)
- 13- Lipolyse Jambes:** 30 minutes. Lutter contre les formes disgracieuses.
Intensité: Modérée (vibration musculaire et légères contractions)
- 14- Lipolyse Hanches, Fesses:** 30 minutes. Lutter contre les formes disgracieuses.
Intensité: Modérée (vibration musculaire et légères contractions)
- 15- Lipolyse Ventre:** 30 minutes. Lutter contre les formes disgracieuses.
Intensité: Modérée (vibration musculaire et légères contractions)
- 16- Lipolysis Bras:** 30 minutes. Lutter contre les formes disgracieuses.
Intensité: Modérée (vibration musculaire et légères contractions)
- 17- Raffermissment Jambes, Hanches, Fesses :** 30 minutes. Raffermer les tissus.
Intensité: Moderate (contractions musculaires visibles et palpables)
- 18- Raffermissment Ventre :** 30 minutes. Raffermer les tissus.
Intensité: Moderate (contractions musculaires visibles et palpables)

19- Raffermissement Bras: 30 minutes. Raffermir les tissus.

Intensité: Moderate (contractions musculaires visibles et palpables)

20- Tonification Bras, Épaules: 25 minutes. Tonifier, renforcer les muscles.

Intensité: Modérée à forte (vibration et contractions intenses)

21- Tonification Jambes, Fesses: 25 minutes. Tonifier, renforcer les muscles.

Intensité: Modérée à forte (vibration et contractions intenses)

22- Toning Abdominaux: 25 minutes. Tonifier, renforcer les muscles.

Intensité: Modérée à forte (vibration et contractions intenses)

23- Sculpt Bras: 20 minutes. Sculpter les muscles, donner une silhouette plus sportive.

Intensité: Modérée à forte (vibration et contractions visibles et palpables)

24- Sculpt Jambes, Fesses: 20 minutes. Sculpter les muscles, donner une silhouette plus sportive.

Intensité: Modérée à forte (vibration et contractions visibles et palpables)

25- Sculpt Abdominaux: 20 minutes. Sculpter les muscles, donner une silhouette plus sportive.

Intensité: Modérée à forte (vibration et contractions visibles et palpables)

26- Tonification Poitrine: 15 minutes. Tonifier, renforcer les muscles pectoraux pour donner du volume à la poitrine.

Intensité: Modérée (vibration et contractions confortables)

27- Tonification Visage: 15 minutes. Tonifier les muscles du visage, diminuer l'effet inesthétique des rides.

Intensité: Faible (vibration et contractions confortables)

REHAB

28- Immobilisation Bras : 15 minutes. Entretenir les muscles pendant une période d'arrêt d'activité sportive.

Intensité: Modérée (contractions musculaires visibles et palpables)

29- Immobilisation Jambes: 25 minutes. Entretenir les muscles pendant une période d'arrêt d'activité sportive.

Intensité: Modérée (contractions musculaires visibles et palpables)

30- Tens: 30 minutes. Courant antalgique de type TENS qui a un effet immédiat de durée variable en fonction du nombre de séances. Ce traitement peut être effectué quotidiennement.

Intensité: Stimulation de confortable fourmillement en dessous du seuil de contraction.

31- Tens Endorphinic: 30 minutes. Courant antalgique de type endorphinique à basse fréquence. L'effet induit aura une action retardée mais prolongée. Peut être effectué quotidiennement alterné aux autres programmes TENS.

Intensité: en dessous du seuil de contraction.

32- Tens douleur à articuler: 30 minutes. Le soulagement de douleur - ne traite pas la cause de la douleur.

Intensité: en dessous du seuil de contraction.

33- Tens, soulagement - NUQUE: 25 minutes. Le soulagement de douleur - ne traite pas la cause de la douleur.

Intensité: en dessous du seuil de contraction.

34- Tens SCIATALGIE: 30 minutes. Courant antalgique de type TENS. Effet anti-inflammatoire. On peut associer des traitements pour renforcer les muscles paravertébraux lombaires pour stabiliser les vertèbres.

Intensité: en dessous du seuil de contraction.

35- Tens Decontractuant: 30 minutes. Traitement indiqué pour ceux qui, après une activité physique intense, n'ont pas effectué d'exercices d'élongation ou présentent un muscle contracté.

Intensité: en dessous du seuil de contraction.

Dotation

- Electrostimulateur palmaire
- Sac pour le transport
- 2 cables de connection
- Enveloppe électrodes 45 X 45 mm.
- Enveloppe électrodes 45 X 90 mm.
- 3 Batteries stylo 1,5 V AAA
- Manuel d'instructions

Accessoires non en dotation (supplément payant)

- Stylo pour la recherche des points pouteurs
- Kit Splitter (2 connecteurs + 2 cables de connection) (4 canaux-8 électrodes)
- Bandes conductrices pour jambes
- Electrodes pour le visage
- Kit cables dédoubleurs en Y
- Gel

L'appareil pour l'élettrostimulation est fournit avec cables et électrodes pour l'utilisation: pour autant, une fois l'emballage ouvert, vérifier que la dotation de base soit complète. Au cas où quelque élément manquerait, contacter immédiatement le magasin autorisé où à été effectué l'achat.

Controler à vue l'intégralité de l'appareil et des électrodes.

Electrodes: Les électrodes en dotation sont utilisables par une seule personne, autoadhésifs, avec Gel et fiche femelle.

Marqués CE aux sens de la directive 93/42/ CEE dispositifs médicaux.

Toutes les informations fournies peuvent être sujettes à modification sans préavis.

Les marques indiquent que l'appareil est à norme CE medicale type BF.

Pour la présence de programmes de stimulation di type clinique, l'appareil est un dispositif médical. Pour autant il est certifié par l'Organisme Certifié (voir couverture) aux sens de la directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux. La certification recouvre les applications cliniques.



Ce symbole sur votre appareil sert à indiquer qu'il est en conformité avec les conditions des directives sur les appareils médicaux (93/42/CEE). Le numéro de l'organisme notifié est 0197.



Attention: lire les instructions jointes

Parties appliquées BF



PRECAUTIONS D'EMPLOI



Ce symbole signifie "Attention, consulter les documents"

Contre-indications

- Stimulation de la partie antérieure du cou (sein carotidien).
- Porteurs de stimulateur cardiaque (pace maker).
- Malades de tumeur (consulter le médecin).
- Stimulation de la région cérébrale.
- Utilisation sur douleurs d'origine inconnue.
- Plaies et pathologies dermatologiques.
- Traumatismes aigus.
- Stimulation sur cicatrices récentes.
- Femmes enceintes.
- Pendant la conduite de véhicules.
- L'utilisation de l'électrostimulateur dans la zone oculaire et génitale est absolument interdite.
- Utilisation de l'électrostimulateur dans l'eau (l'appareil n'est pas protégé contre la pénétration des liquides) et dans milieux avec gas combustibles, vapeurs inflammables ou dans des chambres oxygénées.

Il est conseillé de recourir à l'électrostimulation avec beaucoup d'attention en cas de fragilité des capillaires, vu qu'une stimulation excessive pourrait amener à la rupture d'un nombre majeur de capillaires.

Il est toujours préférable consulter un médecin avant de commencer un traitement.



Possibles effets indésirables

Cas isolés d'irritation cutanée peuvent se vérifier en sujets avec une sensibilité épidermique particulière. En cas de réaction allergique au gel des électrodes suspendre le traitement et consulter un médecin spécialiste.

Si en cours de traitement se présentent des signes de tachycardie ou extrasystolie, il est opportun interrompre l'électrostimulation: tout reviendra à la normalité.



Entretien et nettoyage de l'appareil

- Ne pas intervenir, ouvrir l'appareil. Les réparations peuvent être effectuées seulement par un centre spécialisé et autorisé.
- Pour le nettoyage de l'appareil il suffit d'une serviette souple et légèrement humide.
- Eviter les chocs violents qui pourraient endommager l'appareil et déterminer des malfonctionnements même pas dans l'immédiat.
- Tenir l'électrostimulateur loin de jets d'eau, sources de chaleur, poussière, milieux humides et en directe exposition aux rayons du soleil.
- Ne pas nettoyer l'appareil à l'aide de diluents, gazole, chérosène, alcool, eau ou produits chimiques.
- Après une longue période d'inutilisation, vérifier le correct fonctionnement de l'appareil.
- En cas de détérioration du boîtier de l'appareil, celui-ci va être substitué et ne plus utilisé.
- On déconseille l'utilisation de l'appareil en concomitance avec d'autres appareils électroniques, en particulier d'instruments employés pour le soutien des fonctions vitales.



Avertissements



- L'appareil ne doit pas être utilisé pour fins autres que la neurostimulation transcutanée.
- Les appareils de neurostimulation doivent être utilisés suivant les indications et sous strict contrôle médical ou d'un physiothérapeute habilité.
- L'appareil palmaire doit être utilisé avec les électrodes de neurostimulation transcutanée prévues à cet effet.
- L'appareil doit être tenu hors de la portée des enfants.
- Les appareils de monitoring ECG peuvent être dérangés par le courant de l'électrostimulateur.
- Le courant ne doit pas être appliqué en modalité transthoracique puisqu'il pourrait causer arythmie cardiaque surposant la fréquence de l'électrostimulateur à celle du cœur. (Ne pas effectuer simultanément un traitement sur la poitrine et sur le dos).
- Ne pas utiliser l'appareil sans avoir consulté un médecin en cas de problème de santé quelconque.
- L'utilisation de l'appareil est réservée exclusivement à personnes adultes.
- Ne pas utiliser l'appareil en proximité d'appareils pour thérapie à ondes courtes.

Destination d'emploi



Étudier attentivement le manuel d'utilisation, pour éviter opérations d'installation, usage et maintenance non adéquates qui pourraient endommager le dispositif, l'opérateur ou l'utilisateur.

Les électrostimulateurs sont étudiés pour pouvoir être utilisés en cadres opérationnels tels:

- milieu domestique;
- ambulatoire;
- physiothérapie;
- réhabilitation en général;
- traitements des douleurs en général;
- tout type d'électrostimulation séquentielle;
- en utilisation esthétique et sportive;
- L'utilisation de tel appareil est consentie au patient même (opportunément informé des méthodologies utilisées par l'appareil), personnel médical et paramédical.

Par la présence de stimulation de type clinique, c'est un dispositif médical.
La certification recouvre les applications cliniques.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Nombre de canaux:	2
Courant de sortie:	100 I pp
Forme d'onde:	Impulsion rectangulaire, biphasique, symétrique, compensée
Fréquence de travail:	1-120 Hz
Largeur d'impulsion:	50-320 μ s
Alimentation:	3 batteries stylo 1,5 V AAA del typo LR03
Classification:	Alimentation interne, type BF
Certifications:	Certificat CE MDD (Medical Device Directive).
Température de stockage et de transport :	de -10°C à 45°C
Humidité relative maximale :	75%
Pression atmosphérique :	700 hPa à 1060 hPa
Conditions d'utilisation	
Température d'utilisation :	0°C à 40°C
Humidité relative maximale :	30% à 75%
Pression atmosphérique :	700 hPa à 1060 hPa
Producteur et constructeur sont reportés sur la dernière page	

Écoulement des électrodes et des piles

Ne pas jeter les piles ou les électrodes dans le feu, mais s'en débarrasser suivant les lois l'écoulement de tels objets en vigueur dans son propre pays..

DESCRIPTION DE L' APPAREIL PALMAIRE

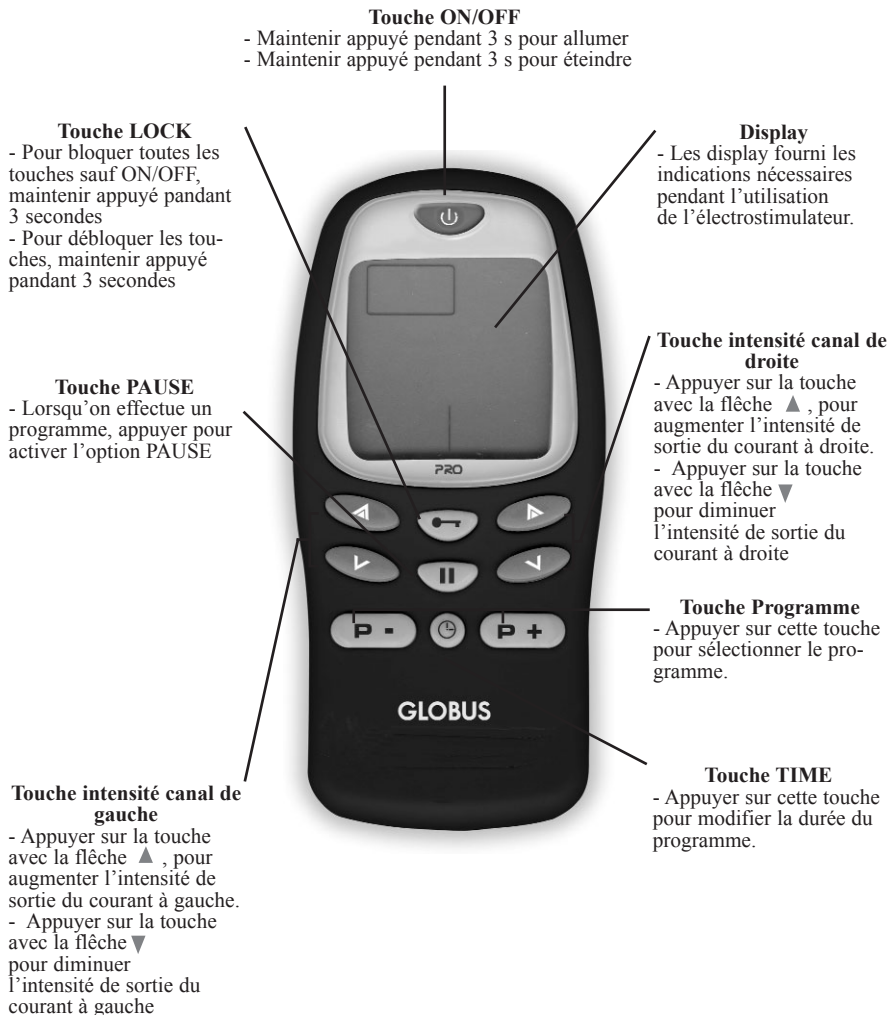

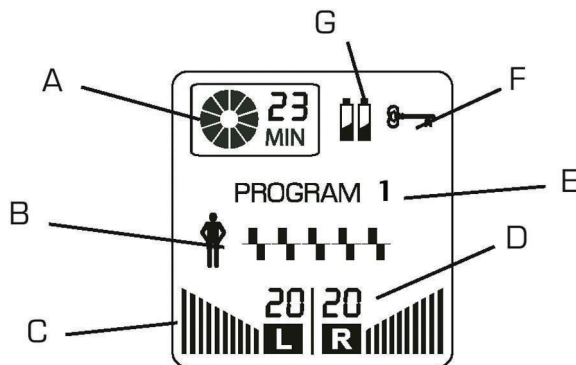

L'appareil a un display de grandes dimensions qui informe à tout moment de l'état des différents paramètres en fonction sur l'unité.

A. Timer:

Indique le temps restant, en minutes, de chaque programme. L'aire du timer comprend une représentation graphique circulaire en mouvement pendant l'exécution.

B. Indicateur d'exécution:

La figure humaine et celle des impulsions indiquent la correcte exécution du programme. Les impulsions représentées graphiquement sont animées de façon différente pour chaque programme. Tant que cette aire est allumée, cela signifie qu'un programme est en exécution.

C. Indicateur grafico d'intensità:

La sbarra grafica mostra il livello dell'intensità in uso.

D. Indicateur numérique d'intensité:

Indique le niveau de l'intensité utilisée, dans une échelle comprise entre 0 et 20.

E. Indicateur Programme:

Indique le programme sélectionné.

F. Indicateur de blocage des touches:

Indique lorsque les touches de l'unité sont bloquées et ne peuvent être appuyées accidentellement.

G. Indicateur de batterie déchargée:

L'Indicateur clignote lorsque les batteries sont entrain d'épuiser leur charge.

GUIDE POUR UNE SIMPLE UTILISATION DU PALMAIRE

Première utilisation

1.  Placer les électrodes sur la zone à traiter (voir placement des électrodes dans ce manuel) et connecter les cables.
2.  Appuyer sur la touche ON/OFF pendant 3 secondes et allumer l'électrostimulateur.
Le display s'allume et indique le dernier programme effectué.
Les indicateurs d'intensité sont à 0 sur les 2 canaux.
3.  Sélectionner le programme qu'on désire effectuer en appuyant sur la touche P+ ou P-.
4.  Pour augmenter l'intensité du canal de gauche (L) appuyer sur la touche sur la flèche ▲ toujours en gardant une stimulation confortable.
Pour diminuer l'intensité du canal de gauche (L) appuyer sur la touche sur la flèche ▼.
5.  Pour augmenter l'intensité du canal de droite (R) appuyer sur la touche sur la flèche ▲ toujours en gardant une stimulation confortable.
Pour diminuer l'intensité du canal de droite (R) appuyer sur la touche sur la flèche ▼.
6.  Pour éteindre l'électrostimulateur (même en cas d'urgence) appuyer sur le touche ON/OFF pendant 3 sec.

Note: Chaque programme a une durée prédéfinie. L'intensité revient à zéro automatiquement lorsque le programme est terminé.

Mettre en pause un programme

Chaque fois qu'on désire mettre en pause un programme, appuyer sur la touche PAUSE. Pour retourner à l'exécution du programme, appuyer sur la touche PAUSE; le programme reprendra là où il a été interrompu.

Fonctions Automatiques

Eteignement automatique

Si l'électrostimulateur est allumé, l'intensité de sortie est égale à 0 et il ne viens pas utilisé pendant 5 minutes, l'unité s'éteint automatiquement.

Relèvement du contact électrique

Si les électrodes ne sont pas appliquées sur la peau de façon correcte, l'intensité des canaux est automatiquement reportée à 0.

Eventuellement, si les électrodes ne sont pas couramment appliquées avant de commencer un traitement, il ne sera pas possible augmenter l'intensité.

C'est une mesure préventive afin d'éviter des contractions indésirées.

Relèvement de batterie déchargée

L'indicateur clignote quand les batteries sont entrain d'épuiser leur charge.

Fonction mémoire

L'électrostimulateur retient en mémoire le dernier programme effectué et le propose lorsqu'on l'allume. La fonction mémire reporte l'unité au premier programme lorsque les batteries viennes substituées.

Intensité de stimulation

La valeur de l'intensité de courant nécessaire pour obtenir une déterminée contraction est totalment personelle, elle peut dépendre du placement des électrodes, de la couche adipeuse, de la tranpiration, de la présence de poils sur la zone à traiter etc... Pour ces raisons une meme intensité de courant peut fournir sensations différentes d'un personne à l'autre, d'un jour à l'autre, d'un coté à l'autre. Pendant la meme séance de travail, il sera nécessaire régler l'intensité pour obtenir la meme contraction par l'effet des phénomènes d'accomodation.

Fonctions spéciales

Bloquage des touches

Une fois le niveau d'intensité désirée atteint, il est possible de bloquer les touches à fin d'en éviter une utilisation accidentelle. Appuyer sur la touche "LOCK" et la maintenir appuyée pendant 3 secondes, Un symbole (clé) apparait sur le display et toutes les touches viennent bloquées sauf la touche ON/OFF. Quand les touches sont bloquées, il est impossible d'augmenter ou diminuer l'intensité ou changer de programme. Pour débloquer les touches, appuyer à nouveau sur la touche "LOCK" pendant 3 secondes, le symbole de bloquage s'éteint et il sera possible utiliser les touches.

Note:

Lors d'un programme avec travail alterné, où sont prévus cycles de travail et repos, il n'est pas possible de modifier la valeur de l'intensité pendant le temps de montée et descente de la contraction.

Positionnement des batteries

Eteindre l'appareil en appuyant sur la touche ON/OFF pendant 3 sec.

Enlever le couvercle des batteries situé à l'arrière de l'unité pour accéder au compartiment batteries. Insérer 3 x 1.5V AAA Type LR03 batteries Alchalynes et repositionner le couvercle. Les batteries doivent être placées avec la polarité correcte indiquée dans le compartiment. Un mauvais placement des batteries peut causer des dommages à l'unité.

Connexion des cables

Il est possible utiliser un ou deux cables, suivant le nombre de canaux de l'unité qu'on choisit d'utiliser.

Pour la connexion, insérer le connecteur du cable dans son logement sur la partie inférieure de l'unité. Les logements sont placés exactement sous le canal correspondant (gauche ou droit). Insérer le cable en correspondance du canal qu'on désire utiliser.

Application des électrodes

Extraire les électrodes de leur confection originale; toutes les électrodes neuves ont une confection scellée.

S'assurer que l'appareil soit éteint.

Pour commencer, connecter les deux fiches des cables aux électrodes, puis détacher les électrodes de leur étiquette et les positionner sur la peau. Pour un correct placement des électrodes, voir les figures reportées dans ce manuel.

Après l'utilisation, replacer les électrodes sur leur étiquette d'origine.

ATTENTION: Ne pas détacher les électrodes si l'unité est en fonction.



Si lorsque j'augmente l'intensité à plus de 10mA celle-ci retourne à 0, que s'est-il passé?

L'appareil dispose d'un contrôle sur l'érogation du courant. Au cas où lorsqu'on augmente l'intensité, le circuit soit ouvert (cables non connectés à l'appareil et électrodes non en contact avec la peau), l'appareil entre en protection automatique.

Il est donc nécessaire avant de commencer un traitement, de s'assurer que les cables soient correctement branchés à l'appareil et les électrodes soient placés sur la zone à traiter.

Apparition de l'indicateur de batterie déchargée. Que faire?

Après quelques applications, avec l'indicateur de batterie déchargée allumé, il sera nécessaire remplacer les piles.

Peut-on se faire mal avec l'électrostimulation?

Il est difficile de se procurer des dommages musculaires. Un principe important à suivre est d'augmenter progressivement l'intensité en faisant attention au comportement du muscle. En cas de doutes, s'adresser à un spécialiste.

Est-il possible d'utiliser l'électrostimulateur pendant le cycle menstruel?

Eventuelles interférences, telles l'anticipation, le retard l'accentuation ou la réduction du cycle résultent être extrêmement subjectives et variables. On conseille tout de même d'éviter les traitements sur la zone abdominale pendant le cycle dans l'immédiat pré-post cycle.

Est-il possible d'utiliser l'électrostimulateur pendant l'allaitement?

Jusqu'à aujourd'hui, aucun effet indésirable a été noté pour ce qui concerne l'emploi de l'électrostimulation pendant la période d'allaitement. On conseille tout de même de ne pas traiter la zone thoracique.

La présence de pathologies dermatologiques telles psoriasis, orticaire etc. empêchent l'utilisation de l'électrostimulateur?

Oui, il est décidément déconseillé de traiter toute zone qui présente une pathologie dermatologique importante.

Après combien de temps peut-on voir les premiers résultats?

Les résultats obtenus du point de vue esthétique sont naturellement subjectifs. Il est tout de même possible affirmer que, pour ce qui regarde la tonification, une fréquence de 3-4 séances par semaines, assidues et constantes peuvent amener de bons résultats déjà après 15 jours; pour les traitements de lipolyse et drainage il faut 40 jours. De meilleurs résultats s'obtiennent si les traitements d'électrostimulation sont associés à un correct style de vie et une bonne activité physique.

CONDITION DE GARANTIE

L'appareil est garanti au premier utilisateur pendant une période de 24 mois à partir de la date de l'achat contre les défauts de fabrication, bien qu'en ayant utilisé correctement l'appareil et en le maintenant dans des conditions d'efficacité normales.

La validité de la garantie, dans le cas où l'utilisateur s'en sert dans un but professionnel est de 12 mois à partir de la date d'achat contre les défauts de matériel ou de fabrication bien qu'en ayant utilisé correctement l'appareil et en l'ayant maintenu dans des conditions d'efficacité normales.

La validité de la garantie est limitée dans les cas suivants:

6 mois pour les accessoires fournis comme par exemple les batteries, le chargeur, les alimentateurs, les câbles, etc...

90 jours pour les supports logiciels comme par exemple CD-ROM, cartes mémoires, etc...

Il n'y a aucune garantie pour les accessoires et les matériaux considérés comme « de consommation » comme par exemple les électrodes, etc

Cette présente garantie est valide et efficace dans le pays de l'achat de l'appareil. Dans le cas où le produit est été acheté dans un autre pays de l'union européenne, la garantie est valide dans quelque soit le pays.

Afin de profiter du service de garantie, l'utilisateur doit respecter les clauses de garanties suivantes:

Les produits devront être consignés pour la réparation et envoyés dans leurs emballages originaux.

1-La garantie du produit sera subordonnée à un document fiscal (ticket de caisse, facture de vente) qui atteste la date de l'achat du produit.

2-La réparation n'aura aucun effet sur la date d'origine de la fin de la garantie et ne portera pas de renouvellement ou d'extension de celle-ci.

3-Dans le cas où, suite à l'intervention technique aucune anomalie n'est été constatée, les dépenses liées à la main d'œuvre seront à votre charge.

4-La garantie est nulle si la défaillance est due aux : coups, chutes, utilisations impropres ou abusives de l'appareil, l'utilisation d'un alimentateur ou de chargeur batteries qui ne sont pas d'origine, altération du produit, remplacement/détachement des sigles de garantie et/ou falsification du produit.

5-Cette même garantie ne couvre pas les dommages causés durant le transport si les emballages ne sont pas appropriés.

6- La garantie n'est pas responsable de l'impossibilité d'utiliser le produit, les coûts indirects ou accidentels, les dommages ou autres frais encourus par l'acheteur.

ASSISTANCE DES PRODUITS









Avant de restituer la machine pour les réparations, nous conseillons de lire attentivement les instructions d'utilisations contenues dans le manuel et de consulter le site dans l'air Club MyGlobus "Que faire en cas de problème"

Dans le cas où le produit doit être envoyé en assistance, se référer au magasin de l'achat ou contacter le service assistance Globus sur le site www.globuscorporation.com sur l'air My Globus.










L'assistance des produits peut être demandée au revendeur du magasin où a été acheté le produit ou en consultant le site Globus dans l'air My Globus.

Les dimensions, les caractéristiques reportées et les photographies du manuel peuvent subir des modifications. Le producteur se réserve le droit de effectuer des changements sans préavis.

+ = Rouge

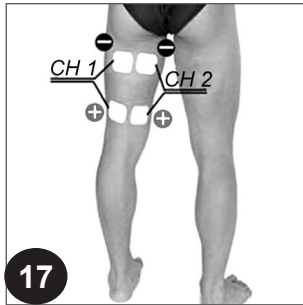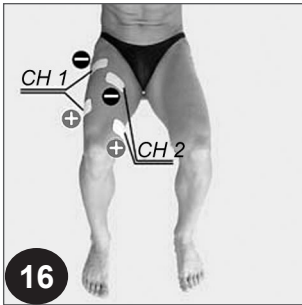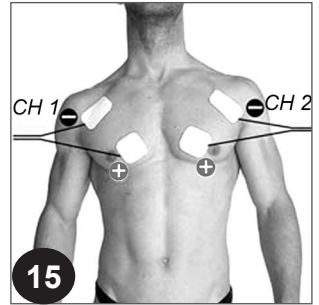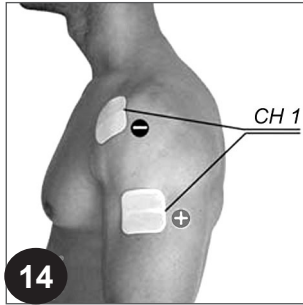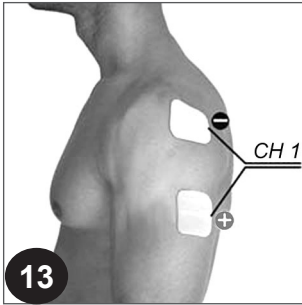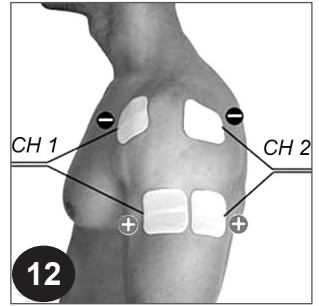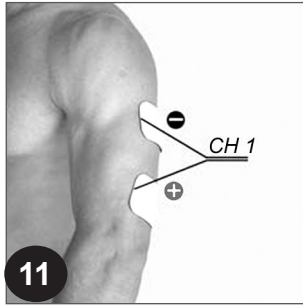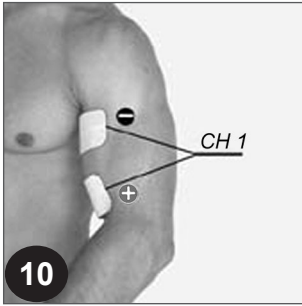

+ = Rouge

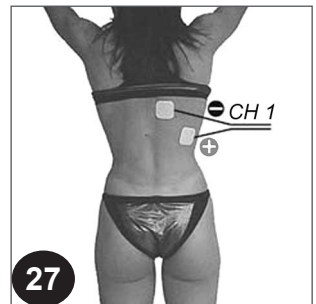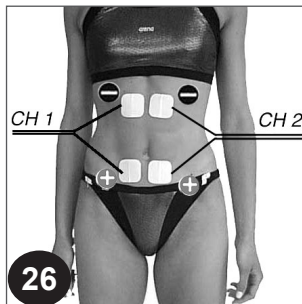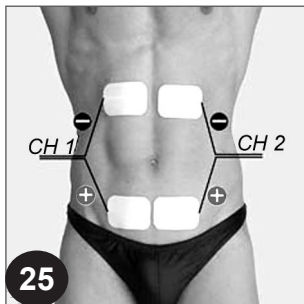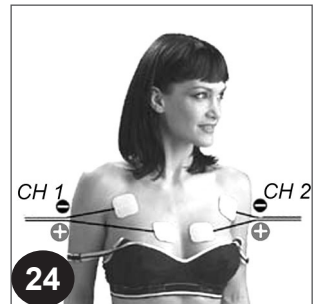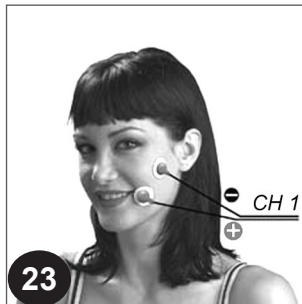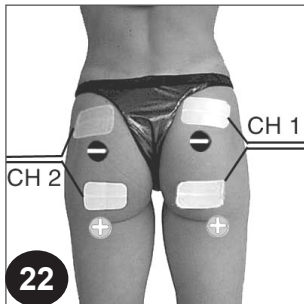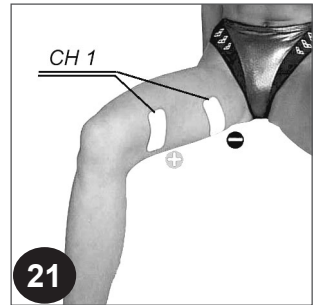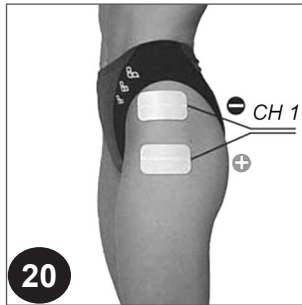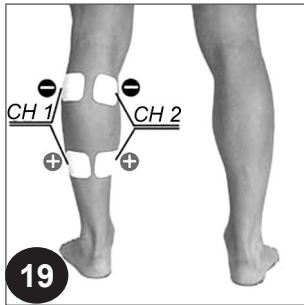

+ = *Rouge*

**WITH CABLES
ACCESSORY
KIT**

